

Ablauf eines Corona Selbsttests

eventuell einen Spiegel mitbringen

Die Kinder kommen in die Schule durch den für sie vorgesehenen Eingang (Info kommt vom Klassenlehrer bzw. durch den Elternbrief)



Hände waschen oder Hände desinfizieren



den Holzständer, das Testset in der weißen Folie, Röhrchen mit Flüssigkeit, Tropfen - Aufsatz und eingepacktes Wattestäbchen holen (auf dem Klassentablett)



in eine freie Testkabine gehen



Röhrchen mit Flüssigkeit in den Röhrchenhalter stellen und Folie vom Röhrchen abziehen



Testkassette aus der Folie entnehmen und auf den Tisch legen



Wattestäbchen aus der Folie nehmen (an der Seite öffnen, wo keine Watte ist)



(evtl. mit Spiegel) Wattestäbchen in einem Nasenloch 4 mal kreisen lassen, dann in das andere Nasenloch und wieder 4 mal kreisen.



Wattestäbchen in das Röhrchen stellen (mit dem Wattebausch in die Flüssigkeit)



Wattestäbchen 12 mal rühren, Röhrchen unten etwas zusammendrücken, dass möglichst viel Material vom Wattestäbchen in die Lösung gelangt. Dann unter Zusammendrücken das Stäbchen herausziehen.



Wattestäbchen mit der Watteseite voraus zurück in die Folie stecken
(nicht den Wattebausch berühren)



Tropfenstöpsel auf das Teströhrchen setzen und gut verschließen



4 Tropfen aus dem Röhrchen auf das ovale Fenster der Testkassette tropfen



Röhrchen und Wattestäbchen zurück in die Folie stecken und in den Mülleimer werfen



Testkassette mit Namen beschriften, auf den Röhrchenständer legen und auf das „Klassentablett“ stellen



Tisch und Stift mit bereitgestelltem Desinfektionsmittel und Küchenpapier reinigen



Hände desinfizieren an bereitgestellten Desinfektionsmittel Spender



Auf dem Schulhof warten, bis ihr gerufen werdet
Auf dem Schulhof auf Abstand achten!!